


HIPPOCAMPE®



Hippocampe Piscine

Notice d'utilisation et de montage

Taille Unique 0002-TS-02-BU

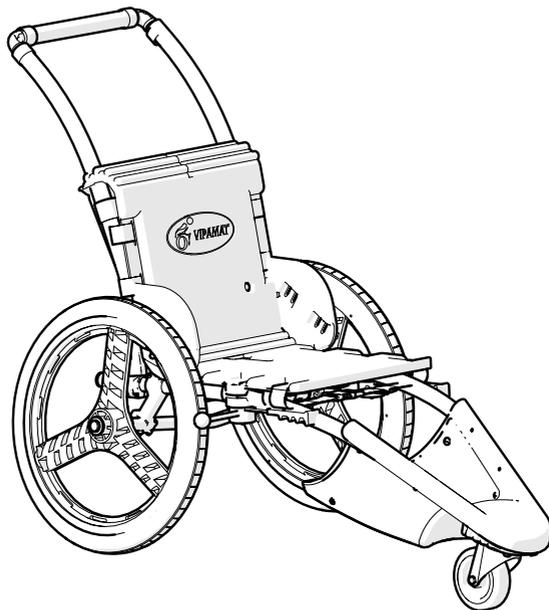

VIPAMAT


3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)
Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81
www.vipamat.com - contact@vipamat.com

Félicitations ! Vous venez d'acquérir l'Hippocampe Piscine de Vipamat. L'Hippocampe vous accompagnera dans les piscines privées ou publiques. Il vous permettra d'accéder à tous les espaces aquatiques : les vestiaires, le pédiluve, les bassins et les bords de la piscine.

Sommaire

1 Découvrez votre Hippocampe Piscine	p2
2 Informations légales et de sécurité	p4
2.1 Précautions de sécurité et d'usage.....	p4
2.2 Déclaration de conformité et conditions de garantie.....	p5
2.3 Maintenance et entretien.....	p5
3 Montage de l'Hippocampe Piscine	p7
3.1 Installation de la paire de roues grises.....	p7
3.3 Installation de la barre de poussée.....	p9
3.2 Montage de l'assise.....	p11
3.3 Montage de l'option ceinture ventrale.....	p13
4 Conseils d'utilisation	p15
4.1 Utilisation des freins de parking.....	p15

1 Découvrez votre Hippocampe Piscine

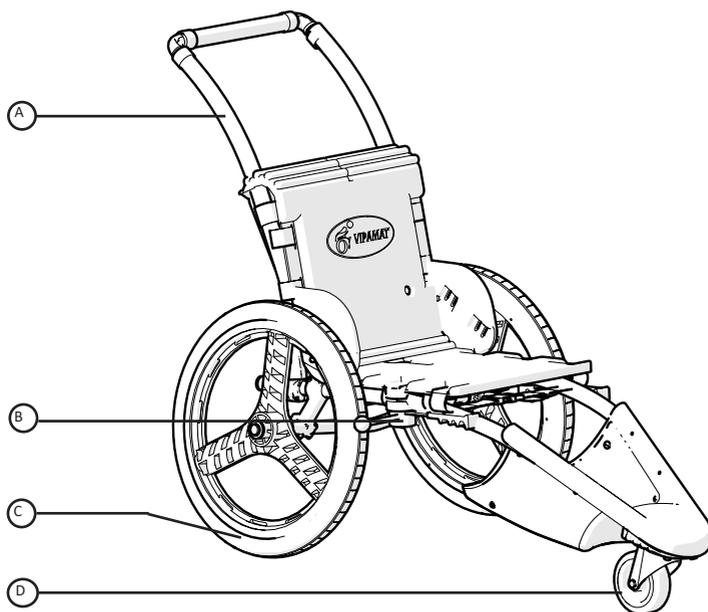

L'Hippocampe Piscine existe en Taille Unique et une ceinture est disponible en option.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| A Barre de poussée | B Freins de parking |
| C Paire de roues grises | D Roue avant pivotante |

IMPORTANT

Conservez précieusement cette notice.

Le strict respect des recommandations et conseils figurant dans ce document est impératif.

Les options disponibles de l'Hippocampe Piscine :



Ceinture ventrale

2 Informations légales et de sécurité

2.1 Précautions de sécurité et d'usage

1. Le strict respect des recommandations et des conseils figurant dans ce document est impératif.



L'Hippocampe Piscine est un fauteuil de piscine qui ne doit être utilisé que dans ce cadre. Il n'est pas fait pour être utilisé en extérieur.

2. Ce fauteuil a été conçu pour faciliter l'accès à la piscine.

3. Avant chaque utilisation du fauteuil, s'assurer que les roues et la barre de poussée soient bien enclenchées en appuyant sur chaque clip et en vérifiant leurs sorties des pièces de jonction.

4. Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles de fermeture d'assise. Les sangles doivent être convenablement tendues et les boucles fermées.

5. L'Hippocampe peut s'utiliser seul ou accompagné.

6. A chaque utilisation de l'Hippocampe, la présence d'un accompagnateur ayant les capacités à diriger, à pousser et à retenir le fauteuil est vivement recommandée.

7. Par mesure de sécurité, l'utilisateur doit être installé au fond du siège, le dos en appui sur le dossier.

8. Comme un fauteuil de ville, l'utilisation de l'Hippocampe nécessite un temps d'adaptation. Quelques manipulations d'essai peuvent être nécessaires à la bonne utilisation de l'Hippocampe.

9. L'Hippocampe doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte si l'utilisateur est un enfant.

10. L'Hippocampe a été conçu pour accueillir une personne seule avec un poids maximum de 130 kg.

11. Il est interdit de monter à plus d'une personne dans l'Hippocampe, ou de se tenir debout sur l'Hippocampe.

12. Se déplacer avec prudence si le sol est en pente. Il est recommandé dans ce cas d'être accompagné.

13. Ne pas franchir d'obstacles de plus de 20 cm avec l'Hippocampe.

14. Ne pas passer sous des obstacles avec l'Hippocampe.

15. Pour des raisons de sécurité ne pas utiliser l'Hippocampe si l'angle de la pente est supérieur à 7°.

16. Utiliser les freins lors des transferts pour bloquer les roues.

17. Ne pas modifier l'Hippocampe et n'utiliser jamais d'autres composants que ceux fournis par Vipamat. L'Hippocampe ne doit pas être utilisé si l'un des composants est défectueux.

18. L'assise et le dossier de l'Hippocampe sont conformes à la norme M1. Cependant le produit doit être conservé à l'écart des flammes.

19. Pour éviter tous risques d'échauffement et de blessures, il est déconseillé de freiner avec les mains lorsque le fauteuil est en pente.

20. Il est déconseillé d'utiliser l'Hippocampe si une roue est crevée ou dégonflée.

21. En cas de doute sur une utilisation en toute sécurité de l'Hippocampe cessez immédiatement de l'utiliser et contacter le service client de Vipamat au 02 97 86 24 87 ou par mail à contact@vipamat.com.

Précautions d'usage pour la baignade :

22. L'Hippocampe permet d'entrer dans l'eau jusqu'à la hauteur d'assise et de se baigner. Il n'est pas conçu pour flotter avec l'utilisateur dessus. L'Hippocampe ne peut pas être considéré comme une embarcation.

23. Toujours être accompagné d'un adulte lors de l'entrée et du transfert dans l'eau ainsi que pendant toute la durée de la baignade.

24. L'Hippocampe doit toujours être utilisé dans une zone de baignade surveillée.

25. Si vous utilisez une ceinture lors de l'entrée dans l'eau et la baignade, cela nécessite un accompagnement et une surveillance accrue.

2.2 Déclaration de conformité et conditions de garantie

Vipamat en tant que fabricant déclare que l'Hippocampe Piscine dispositif de classe 1 (classification européenne) et de classe 2 (classification USA) et ses accessoires dispositifs médicaux sont conformes au règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du conseil et satisfont aux dispositions applicables de la directive Européenne 93/42/CEE et du livre II du code de la santé publique.

Ce produit est garanti 2 ans "pièces et main d'œuvre" à compter de la date d'achat (facture faisant foi). La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses. Cette garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation non-conforme et ne prend pas en compte l'usure des pièces due à l'utilisation du fauteuil. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'Hippocampe peut être utilisé, sa durée de vie prévue est de 4 ans après la date de son achat.

Le numéro de série du produit est gravé sur l'axe arrière du châssis. Le numéro de série de l'option ceinture ventrale est imprimé sur l'étiquette positionnée sur l'emballage de l'option.





Pour jeter l'Hippocampe à la poubelle, rendez-vous dans une déchetterie et mettez-le dans la bonne catégorie de recyclage.

2.3 Maintenance et entretien

- Le fauteuil Hippocampe Piscine est un fauteuil conçu pour résister à l'eau des piscines. Il est composé de pièces en aluminium, en plastique, et en acier inoxydable issues du secteur du nautisme et du cyclisme.
- L'Hippocampe doit impérativement être rincé abondamment à l'eau douce après chaque utilisation.
- La société Vipamat se dégage de toutes responsabilités quant aux dégradations dues à ces négligences.



L'Hippocampe doit être rincé systématiquement à l'eau douce après chaque utilisation. Sans cette maintenance régulière, les traitements des piscines peuvent endommager la structure.

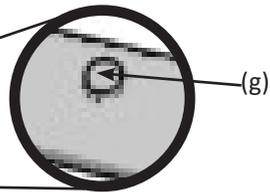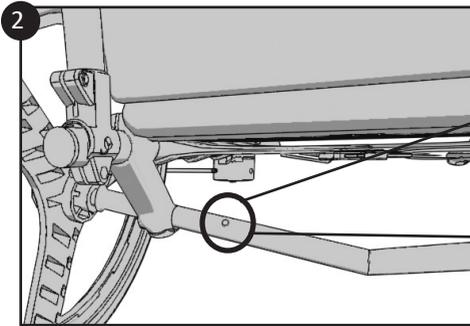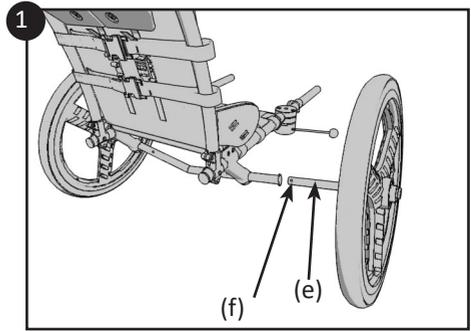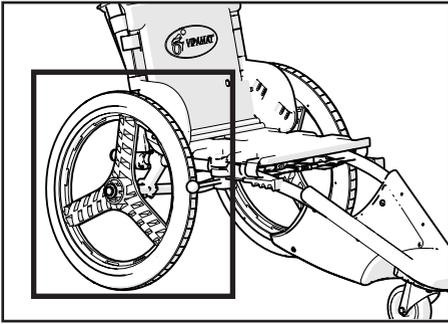

3 Montage de l'Hippocampe

3.1 Installation de la paire de roues grises

❶ Installer les 2 demi-axes dans l'axe du châssis (e).

Presser le clip (f) et insérer complètement le demi-axe de roue avec la roue jusqu'à ce que la roue soit en contact avec l'axe du châssis.




❷ Tourner le demi-axe de roue pour faire sortir le clip dans le trou de perçage de l'axe du châssis (g).

Vérifications:

- Vérifier le verouillage des demis-axes des roues grises en appuyant sur le clip (f) et en vérifiant sa sortie de l'axe du châssis.



Gonfler les roues à 1,5 bars.


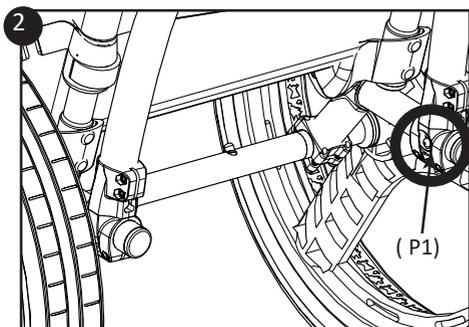
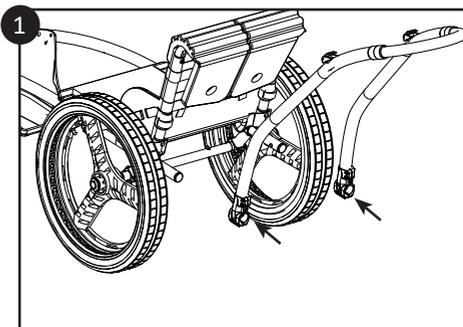
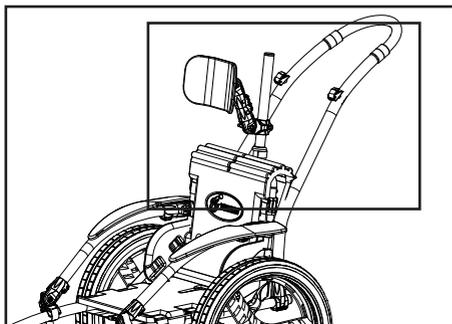


3.2 Installation de la barre de poussée

- ❶ Insérer les 2 pièces de jonction de la barre de poussée dans les tubes du châssis jusqu'aux clips.
- ❷ Presser les 2 clips simultanément de façon à pouvoir insérer plus profondément les 2 pièces de jonction de la barre de poussée et faire ressortir les clips dans l'orifice côté intérieur de chaque pièce de jonction. Les 2 clips doivent ressortir des pièces de jonction de la barre de poussée.

Vérifications:

- Vérifier le verrouillage de la barre de poussée en appuyant sur le clip de chaque côté et en vérifiant sa sortie de la pièce de jonction de la barre de poussée (P1).

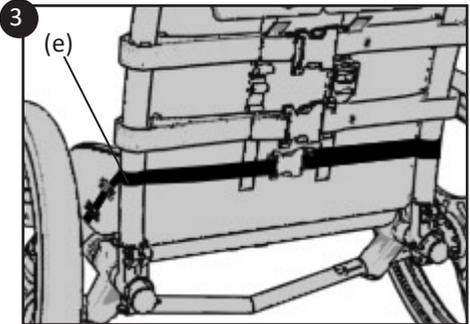
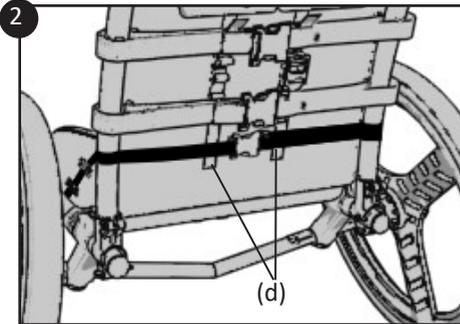
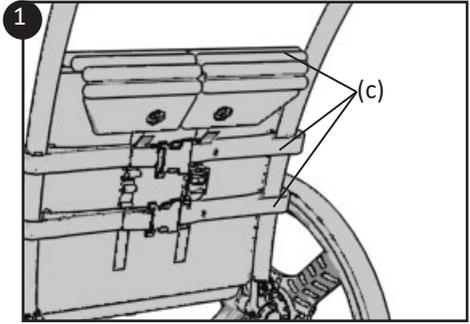
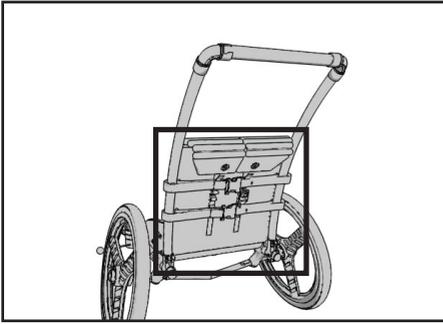


3.3 Montage de l'assise

- ❶ Boucler les 3 sangles horizontales (c) du dossier en positionnant la sangle supérieure du dossier à la hauteur souhaitée, puis recouvrir la sangle supérieure du dossier avec la partie haute du dossier.
- ❷ Mettre en tension les 2 sangles verticales (d) du haut du dossier.
- ❸ Faire passer la sangle latérale dans les passants d'un côté de la mousse assise, puis en dessous de l'assise et repasser par les passants de l'autre côté de l'assise pour venir fermer la boucle de sangle à l'arrière des 2 tubes de la barre de poussée.



Avant chaque utilisation s'assurer que les boucles soient fermées et les sangles bien tendues.

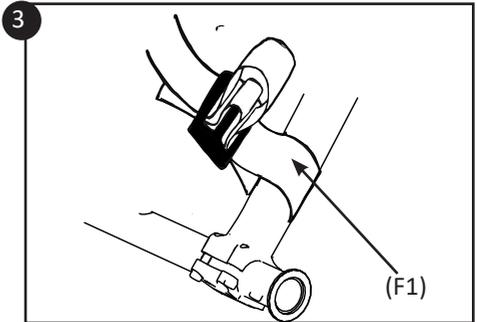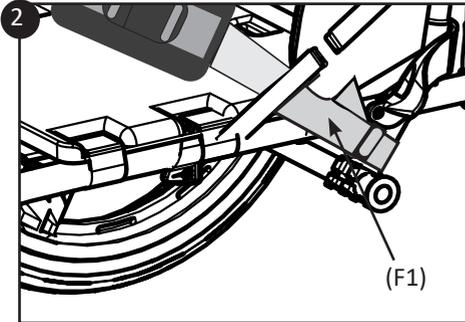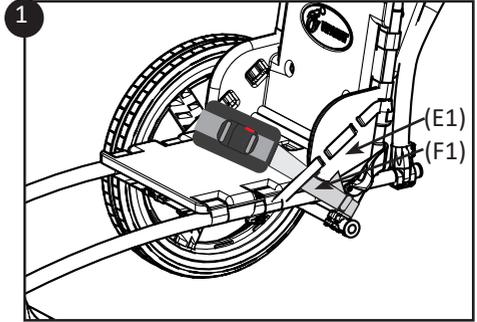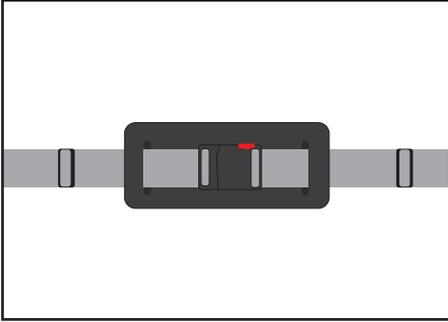


3.4 Montage de l'option ceinture ventrale (0024-00-01)

- ❶ Placer la ceinture sur l'assise et faire passer la sangle (F1) à l'intérieur de la partie (E1).
- ❷ Passer la sangle (F1) de façon à contourner le tube du châssis de l'extérieur vers l'intérieur.
- ❸ Faire passer à nouveau la sangle dans le passant en la faisant sortir d'au moins 2 cm puis serrer.

Vérifications:

- Vérifier que la ceinture soit solidement fixée au châssis de l'Hippocampe

Le numéro de série de la ceinture se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.

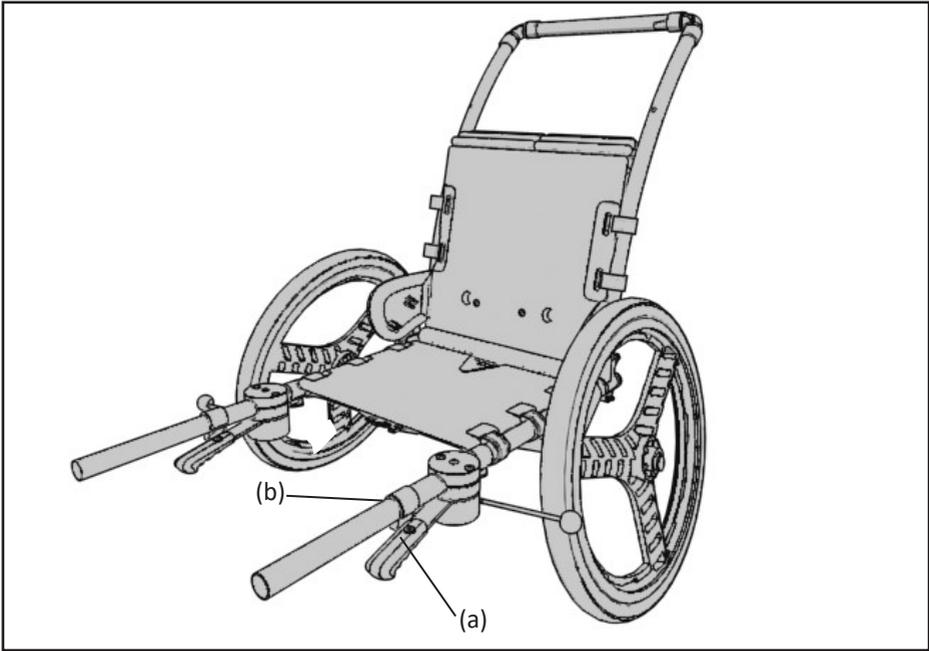

4. Conseils d'utilisation

4.1 Freins de parking

❶ Utiliser les freins lors des transferts pour bloquer les roues. La tige inox doit bloquer les roues et la barre en polyéthylène (a) doit être coincée avec le taquet-coinceur.(b)

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Matériel médical (Medical Device)		Numéro du modèle
	Lire les instructions avant l'emploi		Numéro de série
	Marque CE		Poids maximum utilisateur
	Point d'attention (à retrouver dans la notice)		Date de fabrication
	Ne pas jeter dans la poubelle domestique		Latex free : sans latex
	Fabricant		

Étiquette d'identification :

L'étiquette d'identification est fixée au châssis de votre fauteuil roulant.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'étiquette.

	VIPAMAT (www.vipamat.com)	Made in France	
	3 rue Gustave Eiffel		
	56270 PLOEMEUR France		
	+33-297 862 487(Outside USA)	832848533(USA)	
FAUTEUIL HIPPOCAMPE PISCINE			
SWIMMING-POOL WHEELCHAIR HIPPOCAMPE			
Ref	0002-TS-02-BU	Size TS	Qt 1
SN	000000	LOT 900000	286 Lbs
			02/07/2002
			130 Kg
			
(01)03664560000084(10)900000(21)000000			

Numéro UDI (Identifiant unique des dispositifs)

Retrouvez notre chaîne de tutoriels sur **Youtube**
et suivez nos actualités sur **Facebook** et **Instagram**.



Vipamat



Vipamat
France



Vipamat

Notes

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

Notes

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



FR

Hippocampe Piscine



EN12-02-V2-FR*31/10/2023

FR

VIPAMAT

3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)

Tél : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81

www.vipamat.com - contact@vipamat.com